

感染症隔離ブース 取扱説明書

この度は、弊社製品をお求め頂き、誠に有難うございます。ご使用頂く前に説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。製品を未永くご愛用頂きます為に、下記に挙げる注意事項を正しくお守り頂きます様お願い申し上げます。

※本製品は、屋内用の間仕切りを目的とした製造された商品です。

※フレームの展開、収納時に手を挟まない様に、ご注意ください。


※設置・撤去時には安全の為に、手袋を着用下さい。また2名以上での組み立てをお勧め致します。

※本製品にぶら下がったり、物を吊ったりする事はおやめください。破損の原因となります。

【見取図】

(規格)



ISB-24 1.2m×2.4m

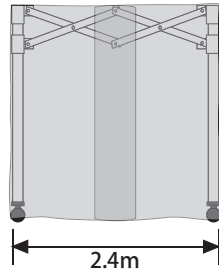

【パーツ図】


フレーム ×1

幕体 ×1

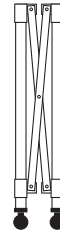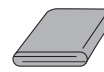


【組立手順】 安全の為に2名以上での組立作業をお願い致します（下記手はPS-KOI-2ですが、他サイズも同様です）。

1-1. フレームの組み立て


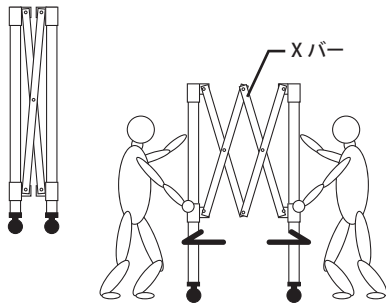


配置したフレームを広げていきます。Xバー下部を上を持ち上げながら、後ろへ下がります。



1-2. フレームの組み立て

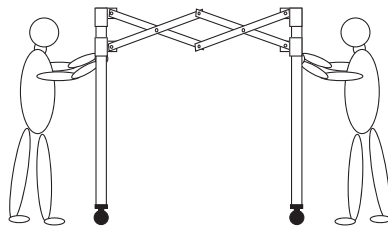

フレームを最後まで広げます（Xバーは柱のストッパーに当たるまで押し上げて下さい）。Xバー下の固定部にある蝶ネジを締め、フレームを固定します。

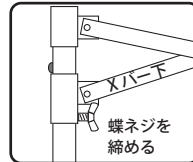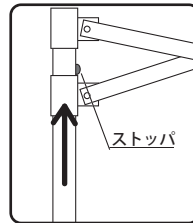


2-1. シートの取付け

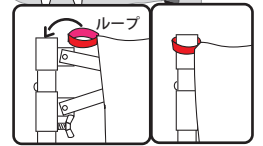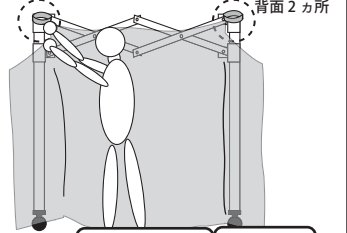


背面部分（2.4m方向）を広げ、両端の柱ヘルプを引っかけます。

2-2. シートの取付け

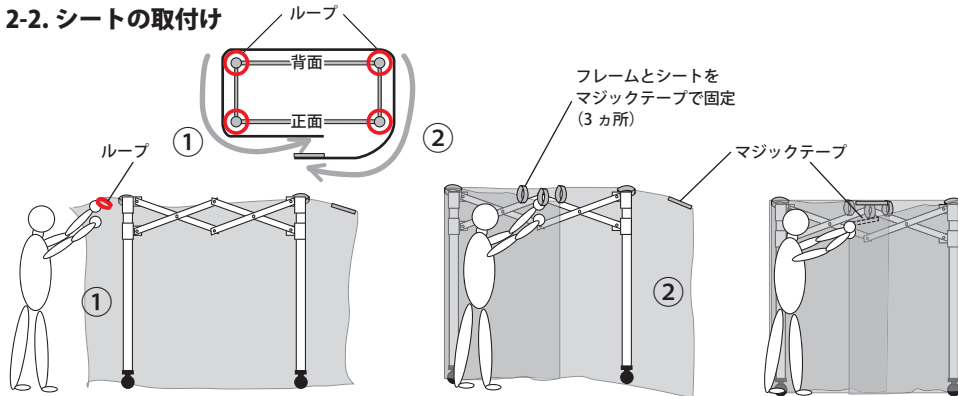

背面を固定したシートの両端を、側面から正面に回していきます。①からフレームの柱ヘルプを固定します。正面はフレームとマジックテープで3カ所固定します。次に反対側面のシート②を同様に回して、正面で①のシートと、マジックテープを止めます。

3. 完成

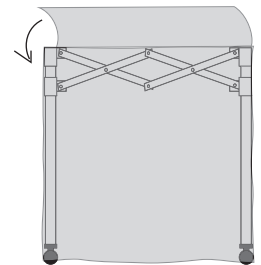

キャスターのストッパーは、状況に応じてご使用下さい。

屋根シートをかぶせて、完成です。（屋根が不要の場合は、開けたままで使用下さい）