



# 【感染症対策テントオプション】PCR検査ブースの取付


## 【取付見取図】

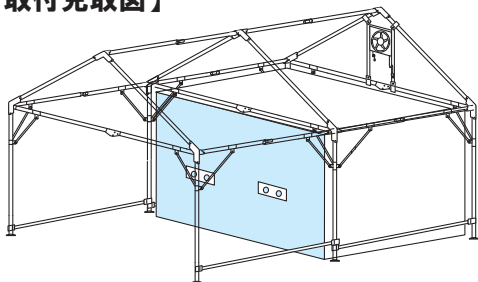

## 【Sサイズ用】ICT-PCRS

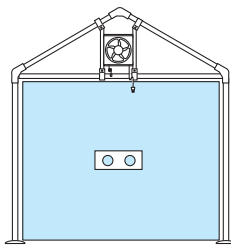


## 【M/Lサイズ用】ICT-PCR/M/L

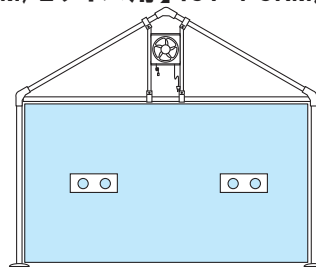


オプションのPCR検査ブースの取付を行う際は、以下の手順をご参照の上、取付をお願い致します。別紙組立説明書の「10.フロアシートの固定」の後に、取付けを行うとスムーズです。


PCR検査ブース本体  
×1

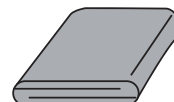


送風機  
×1

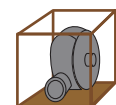


## 1. PCR検査ブースを広げる

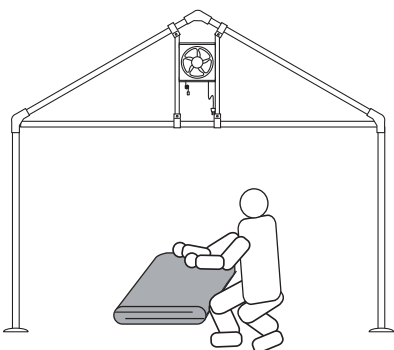


建てた感染症対策テントの中で、PCR検査ブース本体を広げます。

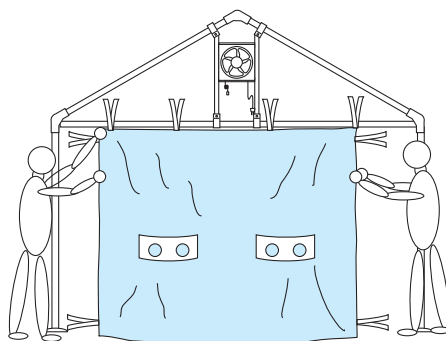

PCR検査ブースの上部、下部にあるリボンをフレームに結わいて固定していきます。

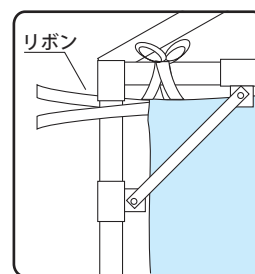


## 2. 送風機をセットする

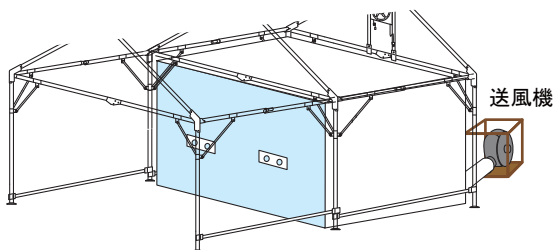

背面に送風機を取り付けて、完成です。  
送風機カバーは付けたままご使用下さい。


### 【背面】

外幕の出入口

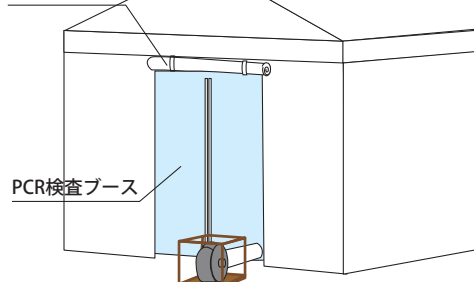

PCR検査ブース

雨除けカバー

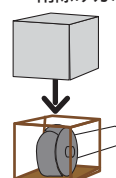

PCR検査ブースへ送風を行う場合（送風機をご使用の場合）、感染症対策テントの背面出入口は開けた状態でご使用下さい。またご使用時は送風機に雨除けカバーを付けて下さい。

【製造元】

ゴトー工業株式会社 埼玉県川口市川口 6-9-14 TEL048-252-3903